

Pflegemittel

Die Anforderungen an Pflegemittel auf einen Blick



Sicherheit

Intensive Desinfektion ist die Grundvoraussetzung für unbeschwertes Kontaktlinsentragen.



Leistungsfähigkeit

Die Pflegeprodukte von Alcon unterstützen Kontaktlinsen dabei, ihre volle Leistungsfähigkeit auszunutzen.



Komfort

Entfernung von Ablagerungen (Proteine, Make-up-Rückstände etc.) für ein komfortables Tragegefühl

Nicht nur die Wahl der richtigen Kontaktlinse ist wichtig, auch das passende Pflegemittel trägt zu langfristigem Tragekomfort bei. Hierbei ist eine optimale Abstimmung von Kontaktlinsen und Pflegemittel für den Kontaktlinsenträger wichtig.

AOSEPT® PLUS

Lieferprogramm

AOSEPT® PLUS

Art.-Typ	Produkt	Inhalt
AP90	AOSEPT® PLUS Erstausrüstung	1 x AOSEPT® PLUS, 90 ml 1 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsenbehälter mit AODISC
TRAVELAP	AOSEPT® PLUS Reise-Set (geeignet für Kontaktlinsen- Einsteiger oder für die Reise)	1 x AOSEPT® PLUS, 90 ml 1 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsenbehälter mit AODISC Handspiegel
APP360	AOSEPT® PLUS Einzelflasche	1 x AOSEPT® PLUS, 360 ml 1 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsenbehälter mit AODISC
APPVP	AOSEPT® PLUS Doppelpack	2 x AOSEPT® PLUS, 360 ml 2 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsenbehälter mit AODISC
APPSY	AOSEPT® PLUS Vierpack	4 x AOSEPT® PLUS, 360 ml 4 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsenbehälter mit AODISC
APPMP	AOSEPT® PLUS Sparpack	5 x AOSEPT® PLUS, 360 ml 5 x AOSEPT® PLUS Kontaktlinsenbehälter mit AODISC



AOSEPT® PLUS

Anwendungsempfehlung und Eigenschaften

Anwendungsempfehlung

- Für weiche Kontaktlinsen aus Hydrogel und Silikon-Hydrogel
- Für formstabile Kontaktlinsen

Eigenschaften

- Zuverlässige Desinfektion über die ISO-Standards hinaus¹
- Keine Konservierungsstoffe am Auge
- Neuer Behälter zu jeder Flasche – der Katalysator steckt fest auf der Kontaktlinshalterung, damit nichts verwechselt oder vergessen werden kann.
- 5 Sekunden mit AOSEPT® PLUS das komplette Körbchen mit den Kontaktlinsen abspülen
- 6 Stunden selbsttätige Neutralisation abwarten
- Aufbewahren der Kontaktlinsen im ungeöffneten Behälter bis max. 14 Tage
- Detaillierte Anwendungshinweise und Sicherheitsinformationen siehe Gebrauchsanweisungen.

